

- ¿Presión en la vejiga?
- ¿Debo cargar una bolsa de orina?

MiroValve® la revolución en las válvulas de catéter Confort máximo y más seguridad, día a día.

El desarrollo reciente de MiroValve® constituye una invención revolucionaria, la cual le da a cada paciente la posibilidad de alcanzar una calidad de vida máxima. Los médicos que se preocupan por sus pacientes prescriben la válvula de catéter MiroValve®

1. Sencillo – Fácil manejo



La válvula de catéter MiroValve® se puede manejar fácilmente con una sola mano.

Con la compuerta deslizante puede abrir la

válvula y vaciar la vejiga sin esfuerzo. Para esto, sujete el extremo anterior de la válvula sobre la tasa del inodoro y deslice la compuerta.

Puede encontrar más información sobre el uso, en el folleto incluido en cada paquete.

La compuerta deslizante tiene un diseño ergonómico y es apta tanto para zurdos, como para diestros, y se deja mover suavemente. De igual forma es de un material antideslizante que ofrece seguridad y comodidad.

Para abrir la válvula, tan solo tiene que tirarla con el dedo, en dirección al cuerpo y la orina saldrá sin problema. ¡Al soltar la compuerta deslizante la válvula se cierra sola y listo!

2. Innovación técnica



No más preocupaciones al irse a la cama: ¡solo inserte el extremo cónico azul en el conector del embudo del catéter y listo!

La válvula de catéter MiroValve® tiene un mecanismo de apertura automático.

¡Finalmente necesita dormir! MiroValve® se queda abierta toda la noche para que la orina pueda salir a la bolsa.

También tiene un mecanismo automático de cierre. Al levantarse, sujete firmemente la válvula por el extremo anterior y de esta forma, la válvula se cierra automáticamente. Después de este procedimiento puede retirar la bolsa de la orina, sin ensuciar.

MiroValve® Brinda una higiene total y absoluta seguridad para pacientes y cuidadores, o personal de asistencia.

La patente ya está solicitada y el producto es hecho en Alemania

3. Moderno



Ya no existe la incomodidad de ensuciar toda la cama o la ropa, evitando así malos olores.

Se reduce el riesgo de infecciones por tapones de catéter y se suprime la búsqueda de la tapa.

Al aplicar un desinfectante clínico en aerosol sobre la válvula, se minimiza aún más el riesgo de una infección microbiana.

4. Universal



Puede usar la válvula de catéter MiroValve® con todos los catéteres comunes y las bolsas de orina corrientes. La válvula se ajusta a los embudos de los fabricantes más comunes de catéteres, y también es apta para casi todos los tipos de bolsas.

5. Rápido y seguro



Es muy fácil instalar la válvula de catéter MiroValve® entre el catéter y la bolsa de orina.

Sólo tiene que meterla en el catéter de orina; el material antideslizante evita que se pueda escapar sin intención.

También debe meter el conector de la bolsa de orina en el extremo azul de la válvula, y esta se sujetará enseguida.

